

KAIP NAUDOTI GREITUOSIUS ANTIGENO TESTUS IŠ SEILIŲ ĖMINIŲ („ČIULPINUKUS“)?



MĖGINIO SURINKIMAS:

1. Prieš atlikdami testą nevalgykite ir negerkite bent 30 min.
2. Dėkite seilių tepinėlį į burną tampono puse. Tamponu patrinkite burną ir liežuvį, kad surinktumėte seiles.
3. Švelniai laikykite testą burnoje ir leiskite seilėms natūraliai kauptis ant tampono.
4. Išimkite tepinėlį iš burnos, kai tamponas prisikaupia seilių ir tampa minkštasis arba indikatorius tampa mėlynas.
5. Surinktą mėginį panaudokite kaip įmanoma greičiau.



TESTO ATLIKIMO EIGA:

1. Testo kortelė turi būti kambario temperatūros.
2. Atidarykite aliuminio folijos pakuotę, padékite testo kortelę ant stalo horizontaliai.
3. Įdėkite seilių tepinėlį su surinktu mėginiu į testo kortelės laikiklį ir nuspauskite seilių tepinėlio žemyn. Seilių tepinėlio gale esantis gumbelis turi įeiti į testo kortelės laikiklio skyle.
4. Kai testas ima veikti, raudona spalva rezultato langelyje pajuda į testavimo priemonės vidurj.
5. Palaukite 10 minučių ir vertinkite rezultatą. Nevertinkite rezultato po 15 minučių.



TESTO REZULTATO INTERPRETAVIMAS:



Teigiamas rezultatas:

Jei matomos abi C ir T spalvotos linijos, testo rezultatas yra teigiamas.



Neigiamas rezultatas:

Jei kontrolinėje C srityje matoma spalvota linija, o testo T srityje neatsiranda jokios spalvotos linijos, rezultatas yra neigiamas.

Nevertintinas rezultatas:

Testo rezultatas yra nevertintinas, jeigu kontrolinėje srityje nesusiformuoja spalvota linija. Mėginys turi būti tiriamas iš naujo naudojant naują testo kortelę.